

救助訓練用人形レスキューマネキン

救助訓練用レスキューマネキン

各種訓練に耐えられるように設計されたレスキューマネキンは実際の災害現場を想定したリアルな救助訓練を行うことができます。高所、密閉された場所、瓦礫の下敷き、火災による燻炎現場などからの人命救助や、担いではしごを降る訓練などに利用できます。日本全国の消防、警察、安全研修施設などで救助訓練に導入されています。



ラインナップ


- レスキューマネキン・165 cm、重量：25 kg (品番：W44511)
- レスキューマネキン・165 cm、重量：48 kg (品番：W44512)
- レスキューマネキン・165 cm、重量：66 kg (品番：W44513)
- レスキューマネキン・165 cm、重量：75 kg (品番：W44514)
- レスキューマネキン・177 cm、重量：66 kg (品番：W44618)
- レスキューマネキン・177 cm、重量：75 kg (品番：W44619)

仕様

材質： 高耐久プラスチック製、関節に金属部品使用
付属品： メンテナンス用工具一式

可動部： 肩、肘、膝、股関節、手首、足首
※首・腰は動きません。

注意事項：
※このマネキンは耐火性ではありません。
※水難救助用には設計されておりません。
※落下実験、衝突実験などには使用できません。

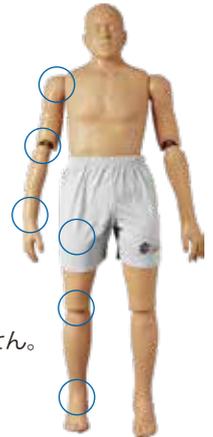

別売りオプション

キャリングバッグ



重量のあるレスキューマネキンの収納、移動に便利な製品です。

内部にはマネキン固定用ベルトがあり、外部には肩掛け用のベルトと複数の持ち手がついていますので、レスキューマネキン移動や収納を楽に行うことができます。

165cm マネキン用キャリングバッグ (品番：W44580)

177cm マネキン用キャリングバッグ (品番：W44620)

重り入りベスト



レスキューマネキンのオプション、重量調節用ベストです。

この重り入りベストをレスキューマネキンに着せることで手軽な重量調節ができます。

重り入りベスト、重量： 9.0 kg (品番：W44516)

重り入りベスト、重量： 13.5 kg (品番：W44517)

重り入りベスト、重量： 18.0 kg (品番：W44518)



<http://humanbody.jp/>

人体模型・医療シミュレータ・生体力学試験材料など最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F
TEL：03-5725-3346 FAX：03-5725-3487


Reference

参考資料

レスキューマネキンについて

可動部・肩

肩を軸に
360° 回転できます。

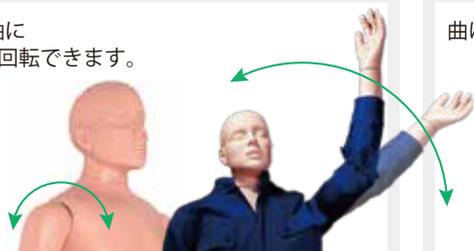

可動部・ひじ

曲げ伸ばしできます。



可動部・手首

180° 回転できます。



可動部・足首

回転範囲は
30° 程度です。



可動部・股関節と膝

膝は 90° 以上曲げることができますので
いすなどに着座させることができます。



重量調整

重り入りベストを
使用してください。



注意事項

※このマネキンは耐火性ではありません。
※水難救助用には設計されておりません。
※落下、衝突実験などには使用できません。

※アイプライスについて
アイプライスは本体の吊り上げには使用できません。フルハーネス等をご利用ください。



アイプライス

お手入れとメンテナンス

レスキューランディはトレーニングプログラムにおいて被災者の代わりとなるものです。常に入念な手入れと取り扱いを行ってください。レスキューランディは過酷な使用に耐える構造となっていますが、本体の変形や内部骨格構造の損傷を防ぐために、炎天下など 40 度を超える環境下に長時間放置したりしないでください。ランディの手足は多関節式の機能を備えています。あまり無理な体勢を取らせたり、腕や手足を極度にねじったりしないようにしてください。

留意点：

本体を引きずりながら移動させる訓練の際に、本体関節の動きを拘束する目的で手足を束ねないでください。トレーニング後はランディをぬるま湯の石けん水などで洗浄してください。ランディは低温下で使用すると本体のプラスチックが硬化することがありますが、常温に戻すと本体プラスチックの柔軟性は自然に回復します。

保管：

可能な限り通常の室温 (15 度～ 30 度程度) で保管してください。

オプションの運搬保管用バッグを使用いただくと、保管時のマネキンを損傷から保護できます。



<http://humanbody.jp/>

人体模型・医療シミュレータ・生体力学試験材料など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F

TEL : 03-5725-3346 FAX : 03-5725-3487

