

採血・静脈注射の練習を繰り返し行える
注射練習用シミュレータです。

品番：KY11267-300
品名：採血・静注シミュレータ「シンジョー2」
販売価格 ¥210,000-（税別）

実習項目

- 尺側皮静脈・正中皮静脈・橈側皮静脈からの採血・静脈内注射実習

特徴

- 採血手技・点滴静脈内注射・静脈内注射手技をこの1台で実習でき、マスターするまで繰り返しトレーニングできます。
- 難易度の違う2種類のパッドが用意されています。
- 準備・後片付け・メンテナンスなど取扱いが容易。
- リアルな皮膚の感触・抵抗感、針の刺入感や血管の深さを再現。

KY11267-300の仕様と構成

仕様：

本体： 成人腕モデル
材質： 軟質特殊樹脂製
大きさ： 成人実物大
収納ケース 約W69×D49×H27cm

別売交換部品

KY11267-300-01 腕モデル
KY11267-300-02 腕台
KY11267-300-03 注射パッド半透明(2個組)
KY11267-300-04 注射パッド赤(2個組)
KY11267-300-05 循環ポンプ
KY11266-080 模擬血液(粉末)30g

構成

a. モデル本体 2台
b. 注射パッド 半透明 2点
c. 注射パッド 赤 2点
d. 腕台 2台
e. 循環ポンプ 1台
f. 広口びん 1点
g. スプーン 1点
h. 模擬血液 30g 1点
i. 収納ケース 1式
取扱説明書 1点



採血実習

シリンジ採血と真空採血の2つの方法が実習できます。

- ・採血前の準備・採血用ホルダーと採血針の接続
- ・採血部位の位置決め・針の挿入角度
- ・注射器および採血ホルダーを持つ手の位置・患者さんの腕の位置
- ・注射器の角度を保持のまま固定する・血液の採取方法
- ・駆血帯をはずすタイミング・真空採血の際の逆流防止・止血の方法
- ・針の取扱い方・感染防止の方法



※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。

<http://humanbody.jp/>

ヒューマンボディ・ホームページ

医学模型・医学書・医学ソフト・標本など最新情報はウェブをご覧ください。

販売：株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F

TEL : 03-5725-3346 FAX : 03-5725-3487

シミュレータを使用して実践的なトレーニング。

血液の逆流

血液が注射器の先端部に逆流するフラッシュバック（バックフロー）が確認できます。さらに循環ポンプを利用して洗浄でき、後片付けがとても簡単です。

実習は通常スイッチを“NORMAL”側にして行いますが、フラッシュバックを確認したいときは、「BF」（反時計まわり）スイッチにあわせて確認できます。確認した後は必ず“NORMAL”に戻します。

循環ポンプにセットした広口ピンに挿入されている吸込・排出チューブを少し上に持ち上げ電源スイッチを入れ循環させると、チューブ内の血液が排出され広口ピンに戻ります。あとは、ピーカーに水を入れ循環させるとチューブ内が洗浄できます。

品番：KY11267-300

品名：採血・静注シミュレータ「シンジヨー2」

販売価格 ¥210,000 - （税別）

点滴静脈内注射

輸液セットなどを用いてDIV（点滴静脈内注射）の実習ができます。

- ・輸液セットを薬液ボトルに装着する方法
- ・注射針を挿入するまでの準備・タコ管の持ち方・刺入角度や長さ
- ・血液の逆流を確かめる方法・角度を保って固定する方法
- ・滴下速度の合わせ方

静脈内注射

静脈内注射の実習ができます。

- ・滅菌操作・薬液の吸い上げ方・肘枕の位置・駆血帯の位置
- ・締め方・はずすタイミング・針の角度・長さ・注射器の持ち方
- ・確実に刺入したことを確認する方法

刺入

生体によく似た刺入時の抵抗感、刺入感覚で、より臨場感あふれる実習をサポートします。

血管が見えにくいタイプ（赤パッド）と見えやすいタイプ（半透明パッド）を用意しています。

触診

血管の見えやすさの異なる2種類のパッドを使用して実習できます。パッドを交換するだけで繰り返し実習できます。



※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。

<http://humanbody.jp/>

ヒューマンボディ・ホームページ

医学模型・医学書・医学ソフト・標本など最新情報はウェブをご覧ください。

販売：株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F

TEL : 03-5725-3346 FAX : 03-5725-3487