

大切な足を生涯守るフットケアの実践に向けたトレーニングモデルです。



巻き爪、肥厚爪（爪白癬）、胼胝、鶏眼などの病変を付け替えることで、フットケアトレーニングが繰り返し行えます。

足部の皮膚や関節の正確な再現により、足のアセスメント（観察方法と手順）などフットケアに関する様々な実習が可能です。

品名：メディカルフットケアモデル「フッティ」

品番：KY11273-000

価格：75,000円（税別）

実習項目

- 爪（肥厚・巻き爪、爪白癬）、胼胝、鶏眼のケア
- 足部の傷や腫れの有無、色調の変化、足底部のアーチの変形の有無などを観察
- 外用剤の塗布方法、マッサージ法
- 踵部の乾燥や角質化に対するケア方法の確認
- 足部の血管位置の確認（足背動脈、後頸骨動脈の触診場所）
- 触圧覚検査でモノフィラメントをあてる位置の確認
- 振動覚検査で音叉をあてる位置の確認



爪のケア

爪と皮膚の間の角質化した部分をグラインダーやフックで取り除きます。肥厚した爪の表面をグラインダーやヤスリを使い、全体が薄く滑らかになるように削っていきます。爪の伸びた部分をニッパー型爪切りでスクエアカットします。少しずつ切り進め、角を切り落とさないようにします。爪切り後はグラインダーやヤスリを使って切り口を滑らかに整えます。

胼胝（たこ）のケア

コーンカッターで硬く角質化した部分を削り、グラインダーやヤスリで表面を滑らかにします。

鶏目（うおのめ）のケア

鶏目の角質塊の部分をグラインダーやヤスリで削り込んでいきます。

仕様	商品構成	交換部品	
足部本体	形状：足部モデル サイズ：成人・実物大 材質：軟質特殊樹脂	足部本体・台付 1台 爪（肥厚・巻き爪）20個 爪（肥厚・爪白癬）20個	(KY11273-020) フッティ交換部品セット 15,000円（税別） (KY11273-030) 爪（肥厚・巻き爪）20個 6,000円（税別） (KY11273-040) 爪（肥厚・爪白癬）20個 6,000円（税別）
爪、胼胝、鶏眼	形状：病変モデル サイズ：成人・実物大 材質：硬質特殊樹脂	胼胝（たこ）10個 鶏眼（うおのめ）10個 取扱説明書 1点	(KY11273-050) 胼胝（たこ）10個 4,400円（税別） (KY11273-060) 鶏眼（うおのめ）10個 4,400円（税別）

※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。

<http://humanbody.jp/>

ヒューマンボディ・ホームページ

医学模型・医学書・医学ソフト・標本など最新情報はウェブをご覧ください。

販売：株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F

TEL: 03-5725-3346 FAX: 03-5725-3487