

思わず抱きしめたくなる、新生児人形。
関節に継目のない一体構造。
沐浴実習でも内部に水が入りません。



■ 特徴

- 大泉門・小泉門の形状が正確に表現されています。
- 首は固定されていません。新生児の首のすわり具合が確認できます。
- 耳介は柔らかく、沐浴実習に適しています。
- 関節の継ぎ目のない一体構造で内部に水が入りません。
- 手足の屈伸が自由に屈伸できます。
- 臍帯は取り外し可能です。
- 多目的な用途に使用できる万能型新生児モデルです。

新生児・沐浴人形 柔シリーズ

KY11258-200 M5963 沐浴人形 柔 A 形 男女ペア

KY11278-200 M59 沐浴人形 柔 新太郎 A 形

KY11259-200 M63 沐浴人形 柔 桃子 A 形

KY11258-210 M5963 沐浴人形 柔 B 形 男女ペア

KY11278-210 M59 沐浴人形 柔 新太郎 B 形

KY11259-210 M63 沐浴人形 柔 桃子 B 形

主な仕様

本 体： 新生児モデル

大きさ： 身長 約 50cm、頭囲 約 33cm

重 量： 約 3 kg

材 質： 軟質特殊樹脂



仕様・概観・価格など予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



<https://humanbody.jp/>

人体ダミー・医療シミュレータ・生体力学試験材料など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒300-3261 茨城県つくば市花畑 3-20-5 D101
TEL：029-846-1176 FAX：029-846-1184

■ 実習項目

- 新生児の沐浴指導・実習
- 臍帯処置および脱落後の観察と処置の実習
- 全身の観察および計測
- 浣腸実習（肛門の腔 約3 cm）
- 衣類・オムツの交換・着脱
- 授乳の実習（A形では授乳後の排尿が確認できます）
- 排尿パック取扱実習
- 耳腔、鼻腔の手入れ

A形とB形のちがい～授乳及びオムツの交換

A形は、口から陰部の先端まで管でつながっていますので、哺乳瓶でミルクを飲ませると排尿し、授乳の練習やオムツの交換もリアルに行えます。

B形は、この機構がありません。その他はA形と同じです。

注意事項

本物の赤ちゃんに接するように優しく扱ってください。モデルは軟質樹脂による皮膚でリアルな触感をだしています。その為、汚れ・シミに等が大変付きやすくなっています。モデルを扱う際は十分ご注意ください。取れない汚れとなります。

また沐浴後は十分に水気をふき取り、パウダーをつけて頂くと汚れにくくなります。使用しない場合は、出来るだけ肌着をつけて保管して下さい。



沐浴



臍帯の処置



衣服の着脱



オムツの交換



授乳（A形のみ、哺乳瓶が付属します）



仕様・概観・価格など予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



<https://humanbody.jp/>

人体ダミー・医療シミュレータ・生体力学試験材料など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒300-3261 茨城県つくば市花畑 3-20-5 D101
TEL：029-846-1176 FAX：029-846-1184

価格表
沐浴人形

	品番	品名	販売価格	
			税抜	税込
1	KY11258-200	M5963 沐浴人形 柔 A形 男女ペア	240,000	264,000
2	KY11258-210	M5963 沐浴人形 柔 B形 男女ペア	228,000	250,800
3	KY11278-200	M59 沐浴人形 柔 新太郎 A形	126,000	138,600
4	KY11278-210	M59 沐浴人形 柔 新太郎 B形	120,000	132,000
5	KY11259-200	M63 沐浴人形 柔 桃子 A形	126,000	138,600
6	KY11259-210	M63 沐浴人形 柔 桃子 B形	120,000	132,000

- 税込価格消費税率：10%
- 2025年9月15日現在の価格です。価格は変更される場合があります。

製品の最新情報・ご注文方法はヒューマンボディ（<https://humanbody.jp/>）をご覧ください。
株式会社アヴィス：〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101