

思わず抱きしめたくなる、新生児人形。
関節に継目のない一体構造。
沐浴実習でも内部に水が入りません。

この沐浴人形は、実物の赤ちゃんにより近い感触をもち、沐浴はもちろん、リアルな赤ちゃん体操や肛門部に於ける、直腸検温・簡単な浣腸の実習も行えます。
尚、A型はミルクを飲ませると排尿するので、授乳の練習やおしめの交換も、より実感を持って実習することが出来ます。

新生児・沐浴人形「柔」シリーズ

KY11258-000 沐浴人形「柔」男女ペア・A形
KY11278-000 沐浴人形「柔」新太郎・A形
KY11259-000 沐浴人形「柔」桃子・A形

KY11258-010 沐浴人形「柔」男女ペア・B形
KY11278-010 沐浴人形「柔」新太郎・B形
KY11259-010 沐浴人形「柔」桃子・B形

主な仕様

身長 / 約 50cm、 体重 / 約 3000g、 頭囲 / 約 33cm

材質 / 特殊軟質樹脂

構造 / 継ぎ目のない一体構造で内部に水が入りません。

※A形は授乳後の排尿が確認できます。



※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。



実習項目

- * 新生児沐浴、赤ちゃん体操、直腸検温などの指導・実習
 - * 臍帯処置及び脱落後の観察と処置の実習
 - * 全身の観察及び計測
 - * 浣腸実習（肛門の腔 約3センチ）
 - * 衣類・おむつの交換着脱
 - * 授乳の実習（A型では授乳後の排尿が確認できます。B型はできません。）
- などの実習が行えます。

<https://humanbody.jp/>

ヒューマンボディ・ホームページ

医学模型・医学書・医学ソフト・標本など最新情報はウェブをご覧ください。

販売：株式会社アヴィス
〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101
TEL：029-846-1176 FAX：029-846-1184

新生児・沐浴人形“柔”シリーズ

A形とB形のちがい～授乳及びおしめの交換

A形は、口から陰部の先端まで管でつながっていますので、哺乳瓶でミルクを飲ませると排尿し、授乳の練習やおしめの交換もリアルに行えます。

B形は、この機構がありません。その他はA型と同じです。

注意事項

本物の赤ちゃんに接するように優しく扱ってください。モデルは軟質樹脂による皮膚でリアルな触感をだしています。その為、汚れ・シミに等が大変付きやすくなっています。モデルを扱う際は十分ご注意ください。取れない汚れとなります。

また沐浴後は十分に水気をふき取り、パウダーをつけて頂くと汚れにくくなります。使用しない場合は、出来るだけ肌着をつけて保管して下さい。



沐浴中



授乳中



首のすわり



衣類の着脱



臍帯の処理



オムツの交換



※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。

<https://humanbody.jp/>

ヒューマンボディ・ホームページ

医学模型・医学書・医学ソフト・標本など最新情報はウェブをご覧ください。

販売：株式会社アヴィス
〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101
TEL：029-846-1176 FAX：029-846-1184

価格表 沐浴人形

	品番	品名	販売価格	
			税抜	税込
1	KY11258-000	沐浴人形柔シリーズ・男女ペアA形	240,000	264,000
2	KY11258-010	沐浴人形柔シリーズ・男女ペアB形	228,000	250,800
3	KY11278-000	沐浴人形柔シリーズ・新太郎A形	126,000	138,600
4	KY11278-010	沐浴人形柔シリーズ・新太郎B形	120,000	132,000
5	KY11259-000	沐浴人形柔シリーズ・桃子A形	126,000	138,600
6	KY11259-010	沐浴人形柔シリーズ・桃子B形	120,000	132,000

- 税込価格消費税率：10%
- 2025年4月1日現在の価格です。価格は変更される場合があります。

製品の最新情報・ご注文方法はヒューマンボディ (<https://humanbody.jp/>) をご覧ください。
株式会社アヴィス：〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101